



COMFORTEO Węglowski i Strykiewicz Sp. k.
Opatów, ul. Bolestawiecka 14a
63-645 Łęka Opatowska
POLSKA

INSTRUKCJA UŻYWANIA MATERACA MEDYCZNEGO

MAGIC

Wydano dnia 10.01.2025

Ważne informacje o produkcie

Przed przystąpieniem do użytkowania materaca proszę zapoznać się z zasadami prawidłowego użytkowania, co pozwoli na wydłużenie czasu eksploatacji, bez znaczącej utraty jego właściwości przedstawionych w ofercie Comforteo. Prawidłowe użytkowanie jest również podstawą do składania roszczeń przez klienta w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z brzmieniem Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176, z 2004 r. nr 96, poz. 959, z 2009 r. nr 115, poz. 960).

Materac medyczny Magic o twardościach H3/H4 to model, który doskonale dopasowuje się do ciała dzięki połączeniu sprężyn kieszeniowych z pianką XFoam. Sprężyny kieszeniowe, które charakteryzują się tym, że pracują niezależnie od siebie, zapewniają prawidłowe ułożenie kręgosłupa, bez względu na pozycję w trakcie snu. Oprócz tego dzielą powierzchnię materaca na 7 stref twardości, dzięki czemu optymalnie podpierają każdą partię ciała i minimalizują ucisk. Zastosowana w tym modelu dodatkowa warstwa wysokoelastycznej pianki antybakteryjnej chroni przed drobnoustrojami, a jej plastyczność i sprężystość dają wrażenie przyjemnego otulenia. Materac Magic jest dwustronny i ma dwie różne twardości, dzięki czemu łatwo dopasowuje się do aktualnych potrzeb użytkowników. Możliwość obracania wydłuża również jego żywotność, gwarantując, że na długo zachowa swoje właściwości.

Model ten ubrany jest w pokrowiec Silver wykonany z wyjątkowo miękkiej dzianiny, która również zapewnia ochronę przed bakteriami. Jego struktura została wzbogacona o jony srebra, które skutecznie zapobiegają ich namnażaniu, redukując ryzyko infekcji. Alternatywnie można wybrać również pokrowiec Silk, uszyty z dzianiny zawierającej włókna jedwabiu, dzięki czemu jest miękki i delikatny w dotyku. Istotne są także właściwości termoregulacyjne jedwabiu, które zapewniają optymalną temperaturę do spania przez cały rok. Oba pokrowce charakteryzują się łatwością w utrzymaniu czystości — można je prać w temperaturze do 60°C, zapewniając sobie higienę i świeżość.

Materac Magic pomaga w łagodzeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz napięcia mięśniowego. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu rozłożeniu nacisku, które zmniejsza obciążenie we wrażliwych

obszarach ciała, redukując przez to ból i dyskomfort odczuwany podczas snu. Model ten jest szczególnie polecany osobom, cierpiącym na różne schorzenia kręgosłupa, takie jak skolioza, dyskopatia czy rwa kulszowa, które potrzebują komfortu i jakości na najwyższym poziomie.

Materac nie powinien być stosowany u pacjentów, którzy wykazują się nadwrażliwością na którykolwiek materiał, wchodzący w skład wyrobu.

Wkład materaca zawiera:

1. Piankę wysokoelastyczną antybakteryjną
2. Piankę poliuretanową (X Foam) - obustronnie
3. Filc - obustronnie
4. Sprężyny kieszeniowe 7-polowe

Pokrowiec materaca zawiera:

1. Dzianina PES
2. Owata
3. Flizelina

ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA MATERACY

1. Przed włożeniem materaca w ramę łóżka należy sprawdzić, czy stelaż jest właściwie podparty i wypoziomowany. Niewłaściwe wypoziomowanie stelaża może skutkować uszkodzeniem materaca.
2. Regularne odwracanie materaca średnio co 3 miesiące w płaszczyźnie wertykalnej i horyzontalnej.
3. Użytkowanie materaca na odpowiednio dobranym stelażu zgodnie z sugestiami oferty. Materacy nie należy stosować na stelażach o nieprawidłowym rozstawie listew (odbiegających od oferty producenta), stelażach siatkowo-sprężynowych, z desek itd.
4. Stelaże posiadające listwę środkową powinny być podparte zarówno na swych długich bokach, jak i na środku.
5. Materaca nie należy kłaść na powierzchniach takich, jak podłoga lub płyta, a także przechowywać w pomieszczeniach wilgotnych, gdyż może to spowodować ich zapleśnienie.
6. Materace i stelaże powinny być odpowiednio dobrane dla klienta pod kątem jego wagi na etapie zakupu zgodnie z sugestiami producenta zawartymi w materiałach promocyjnych lub zgodnie z zaleceniami konsultanta Comforteo.
7. Na materacu nie powinno się skakać, stawać lub umieszczać ciężkich przedmiotów, gdyż może to prowadzić do jego zniszczenia.
8. Materaca sprężynowego nie należy zginać ani „łamać” np. w trakcie jego transportowania. Jedynym, bezpiecznym sposobem zginania materaca jest metoda „vacuum” stosowana przez producenta.
9. Pokrowiec przeznaczony do prania (posiadający wszyty zamek rozdzielczy) należy prać zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na wszywce, tj.
 - a. Nie czyścić chemicznie
 - b. Nie suszyć w suszarce
 - c. Nie prasować

- d. Nie wyżywać
 - e. Prać w temperaturze do 60 st. C
10. W przypadku wystąpienia niezgodności z umową w zakupionym materacu, stelażu lub pokrowcu nie należy naprawiać samodzielnie.

Materac nie może być dalej użytkowany, gdy:

- materac uległ deformacji na powierzchni spania o odkształceniu większym niż 20 mm;
- pokrowiec uległ rozdarciu i widoczna jest owata;
- pianka uległa rozdarciu;
- uszkodzona sprężyna przebiła powierzchnię materaca w którymkolwiek miejscu.

W przypadku podejrzenia, że użytkowanie materaca spowodowało pogorszenia się stanu zdrowia, należy skontaktować z pracownikiem służby zdrowia.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Legenda symboli



Wyrób medyczny



Znak CE



Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją używania



Data produkcji



Nazwa i adres producenta



Chronić przed wilgocią



Kod UDI



Numer Seryjny produktu