



COMFORTEO Węglowski i Strykiewicz Sp. k.
Opatów, ul. Bolestawiecka 14a
63-645 Łęka Opatowska
POLSKA

INSTRUKCJA UŻYWANIA MATERACA MEDYCZNEGO

SLEEP

Wydano dnia 10.01.2025

Ważne informacje o produkcie

Przed przystąpieniem do użytkowania materaca proszę zapoznać się z zasadami prawidłowego użytkowania, co pozwoli na wydłużenie czasu eksploatacji, bez znaczącej utraty jego właściwości przedstawionych w ofercie Comforteo. Prawidłowe użytkowanie jest również podstawą do składania roszczeń przez klienta w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z brzmieniem Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176, z 2004 r. nr 96, poz. 959, z 2009 r. nr 115, poz. 960).

Materac medyczny Sleep o średniej twardości H3 to połączenie klasycznej sprężyny kieszeniowej i trwałej pianki XFoam, które razem zapewniają komfortowy, regenerujący sen. Sercem tego modelu są pracujące niezależnie od siebie sprężyny kieszeniowe, które precyzyjnie dopasowują się do sylwetki i dbają o prawidłowe ułożenie kręgosłupa bez względu na pozycję w trakcie snu. Oprócz tego dzielą one powierzchnię materaca na 7 stref twardości, które odpowiadają anatomicznej budowie ciała, dzięki czemu otrzymuje ono optymalne wsparcie. Sprężyny są obustronnie obłożone pianką, co jeszcze bardziej zwiększa komfort odpoczynku i pozwala na używanie materaca po obu stronach. Z kolei regularne obracanie materaca sprzyja równomiernemu zużyciu i wydłuża jego żywność, co w połączeniu z wysokiej jakości komponentami gwarantuje, że na długo zachowa swoje właściwości.

Całość zamknięta jest w pokrowcu Aero, uszytego z przewiewnej, miękkiej i przyjemnej w dotyku dzianiny o wysokiej gramaturze. Pikowana powierzchnia pokrowca po pierwsze zapewnia lepszą wentylację podczas snu, a po drugie nadaje mu eleganckiego wykończenia.

Istnieje także możliwość wyboru alternatywnego pokrowca Silver, który również jest wykonany z miękkiej dzianiny, ale dodatkowo zapewnia ochronę przed bakteriami, ponieważ jego struktura została wzbogacona o jony srebra, które skutecznie zapobiegają ich namnażaniu, redukując ryzyko infekcji. Oba pokrowce są łatwe do utrzymania w czystości i można je prać w temperaturze do 60°C, zapewniając sobie higienę i świeżość.

Materac Sleep został zaprojektowany z myślą o osobach zmagających się z bólem kręgosłupa i napięciem mięśniowym. Dzięki optymalnemu rozłożeniu nacisku, odciąża newralgiczne punkty ciała, co przekłada się na redukcję dolegliwości bólowych oraz poprawę komfortu snu. To doskonały wybór dla osób cierpiących na schorzenia takie jak skolioza, dyskopatia czy rwa kulszowa, które poszukują zdrowego, komfortowego i regenerującego wypoczynku.

Materac nie powinien być stosowany u pacjentów, którzy wykazują się nadwrażliwością na którykolwiek materiał, wchodzący w skład wyrobu.

Wkład materaca zawiera:

1. Piankę poliuretanową (XFfoam) obustronnie
2. Filc obustronnie
3. Sprężyny kieszeniowe 7-polowe

Pokrowiec materaca zawiera:

1. Dżianina PES
2. Owata
3. Flizelina

ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA MATERACY

1. Przed włożeniem materaca w ramę łóżka należy sprawdzić, czy stelaż jest właściwie podparty i wypoziomowany. Niewłaściwe wypoziomowanie stelaża może skutkować uszkodzeniem materaca.
2. Regularne odwracanie materaca średnio co 3 miesiące w płaszczyźnie wertykalnej i horyzontalnej.
3. Użytkowanie materaca na odpowiednio dobranym stelażu zgodnie z sugestiami oferty. Materacy nie należy stosować na stelażach o nieprawidłowym rozstawie listew (odbiegających od oferty producenta), stelażach siatkowo-sprężynowych, z desek itd.
4. Stelaże posiadające listwę środkową powinny być podparte zarówno na swych długich bokach, jak i na środku.
5. Materaca nie należy kłaść na powierzchniach takich, jak podłoga lub płyta, a także przechowywać w pomieszczeniach wilgotnych, gdyż może to spowodować ich zapleśnienie.
6. Materace i stelaże powinny być odpowiednio dobrane dla klienta pod kątem jego wagi na etapie zakupu zgodnie z sugestiami producenta zawartymi w materiałach promocyjnych lub zgodnie z zaleceniami konsultanta Comforteo.
7. Na materacu nie powinno się skakać, stawać lub umieszczać ciężkich przedmiotów, gdyż może to prowadzić do jego zniszczenia.
8. Materaca sprężynowego nie należy zginać ani „łamać” np. w trakcie jego transportowania. Jedynym, bezpiecznym sposobem zginania materaca jest metoda „vacuum” stosowana przez producenta.
9. Pokrowiec przeznaczony do prania (posiadający wszyty zamek rozdzielczy) należy prać zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na wszywce, tj.
 - a. Nie czyścić chemicznie
 - b. Nie suszyć w suszarce
 - c. Nie prasować

- d. Nie wyżywać
 - e. Prać w temperaturze do 60 st. C
10. W przypadku wystąpienia niezgodności z umową w zakupionym materacu, stelażu lub pokrowcu nie należy naprawiać samodzielnie.

Materac nie może być dalej użytkowany, gdy:

- materac uległ deformacji na powierzchni spania o odkształceniu większym niż 20 mm;
- pokrowiec uległ rozdarciu i widoczna jest owata;
- pianka uległa rozdarciu;
- uszkodzona sprężyna przebiła powierzchnię materaca w którymkolwiek miejscu.

W przypadku podejrzenia, że użytkowanie materaca spowodowało pogorszenia się stanu zdrowia, należy skontaktować z pracownikiem służby zdrowia.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Legenda symboli



Wyrób medyczny



Znak CE



Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją używania



Data produkcji



Nazwa i adres producenta



Chronić przed wilgocią



Kod UDI



Numer Seryjny produktu