



COMFORTEO Węglowski i Strykiewicz Sp. k.
Opatów, ul. Bolesławiecka 14a
63-645 Łęka Opatowska
POLSKA

INSTRUKCJA UŻYWANIA MATERACA MEDYCZNEGO

STAR

Wydano dnia 10.01.2025

Ważne informacje o produkcie

Przed przystąpieniem do użytkowania materaca proszę zapoznać się z zasadami prawidłowego użytkowania, co pozwoli na wydłużenie czasu eksploatacji, bez znaczącej utraty jego właściwości przedstawionych w ofercie Comforteo. Prawidłowe użytkowanie jest również podstawą do składania roszczeń przez klienta w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z brzmieniem Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176, z 2004 r. nr 96, poz. 959, z 2009 r. nr 115, poz. 960).

Materac medyczny Star o twardości H4 to doskonałe połączenie klasycznej sprężyny kieszeniowej z wytrzymałą pianką XFoam. Podstawą tego modelu są pracujące niezależnie od siebie sprężyny kieszeniowe, które dzielą powierzchnię materaca na 7 stref twardości, odpowiadających anatomicznej budowie sylwetki. Dzięki temu kręgosłup jest prawidłowo ułożony w każdej pozycji w trakcie snu. Budowa strefowa zapewnia też optymalne podparcie każdej części ciała. Sprężyny są obustronne obłożone pianką o grubości aż 5 cm, co gwarantuje wyjątkowo komfortowy odpoczynek i pozwala na używanie materaca po obu stronach. Natomiast regularne obracanie materaca sprzyja równomiernemu zużyciu i wydłuża jego żywność, co w połączeniu z wysokiej jakości komponentami gwarantuje, że na długo zachowa swoje właściwości.

Wszystko to zamknięte jest w pokrowcu Master, uszytym z niezwykle przyjemnej, oddychającej dzianiny, która dba o wentylację i odpowiednią cyrkulację powietrza, utrzymując świeżość. Dodatkowo jego pikowana powierzchnia prezentuje się niezwykle elegancko w sypialni. Istnieje także możliwość wyboru alternatywnego pokrowca Silver, który jest wykonany z miękkiej dzianiny i zapewnia ochronę przed bakteriami, ponieważ jego struktura została wzbogacona o jony srebra, które skutecznie zapobiegają ich namnażaniu, redukując ryzyko infekcji. Oba pokrowce można łatwo zdjąć i wyprać w pralce w temperaturze do 60°C, co gwarantuje pełną higienę.

Star to materac, który skutecznie wspiera walkę z bólem pleców i napięciem mięśniowym. Jego innowacyjna konstrukcja pozwala na równomierne rozłożenie ciężaru ciała, co odciąża kręgosłup i pomaga zredukować uczucie dyskomfortu podczas snu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób borykających się z problemami takimi jak dyskopatia, skolioza czy rwa kulszowa, które oczekują maksymalnej wygody i jakości.

Materac nie powinien być stosowany u pacjentów, którzy wykazują się nadwrażliwością na którykolwiek materiał, wchodzący w skład wyrobu.

Wkład materaca zawiera:

1. Piankę poliuretanową (XFoam) obustronnie
2. Filc obustronnie
3. Sprężyny kieszeniowe 7-polowe

Pokrowiec materaca zawiera:

1. Dżianina PES
2. Owata
3. Flizelina

ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA MATERACY

1. Przed włożeniem materaca w ramę łóżka należy sprawdzić, czy stelaż jest właściwie podparty i wypoziomowany. Niewłaściwe wypoziomowanie stelaża może skutkować uszkodzeniem materaca.
2. Regularne odwracanie materaca średnio co 3 miesiące w płaszczyźnie wertykalnej i horyzontalnej.
3. Użytkowanie materaca na odpowiednio dobranym stelażu zgodnie z sugestiami oferty. Materacy nie należy stosować na stelażach o nieprawidłowym rozstawie listew (odbiegających od oferty producenta), stelażach siatkowo-sprężynowych, z desek itd.
4. Stelaże posiadające listwę środkową powinny być podparte zarówno na swych długich bokach, jak i na środku.
5. Materaca nie należy kłaść na powierzchniach takich, jak podłoga lub płyta, a także przechowywać w pomieszczeniach wilgotnych, gdyż może to spowodować ich zapleśnienie.
6. Materace i stelaże powinny być odpowiednio dobrane dla klienta pod kątem jego wagi na etapie zakupu zgodnie z sugestiami producenta zawartymi w materiałach promocyjnych lub zgodnie z zaleceniami konsultanta Comforteo.
7. Na materacu nie powinno się skakać, stawać lub umieszczać ciężkich przedmiotów, gdyż może to prowadzić do jego zniszczenia.
8. Materaca sprężynowego nie należy zginać ani „łamać” np. w trakcie jego transportowania. Jedynym, bezpiecznym sposobem zginania materaca jest metoda „vacuum” stosowana przez producenta.
9. Pokrowiec przeznaczony do prania (posiadający wszyty zamek rozdzielczy) należy prać zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na wszywce, tj.
 - a. Nie czyścić chemicznie
 - b. Nie suszyć w suszarce
 - c. Nie prasować

- d. Nie wyżywać
 - e. Prać w temperaturze do 60 st. C
10. W przypadku wystąpienia niezgodności z umową w zakupionym materacu, stelażu lub pokrowcu nie należy naprawiać samodzielnie.

Materac nie może być dalej użytkowany, gdy:

- materac uległ deformacji na powierzchni spania o odkształceniu większym niż 20 mm;
- pokrowiec uległ rozdarciu i widoczna jest owata;
- pianka uległa rozdarciu;
- uszkodzona sprężyna przebiła powierzchnię materaca w którymkolwiek miejscu.

W przypadku podejrzenia, że użytkowanie materaca spowodowało pogorszenia się stanu zdrowia, należy skontaktować z pracownikiem służby zdrowia.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Legenda symboli



Wyrób medyczny



Znak CE



Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją używania



Data produkcji



Nazwa i adres producenta



Chronić przed wilgocią



Kod UDI



Numer Seryjny produktu